


Art.-Nr. 157510000


PAX Reparaturaufkleber Vakuum

FT
10x7,5

- 1 Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein.

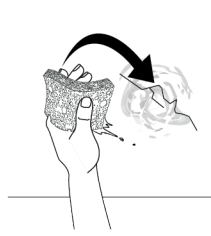

- 2 Schneiden Sie die mitgelieferten Klebestreifen rund auf die benötigte Größe zu.

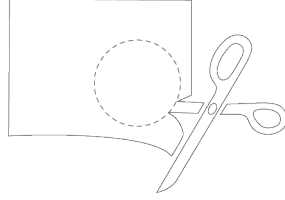


Hinweis: Der Aufkleber sollte zu allen Seiten mindestens 10mm größer sein als die Beschädigung.

Item no. 157510000


PAX Repair Patch Vacuum

FT
10x7,5

- 1 The surfaces to be bonded must be dry, free of dust, grease and other contaminants.

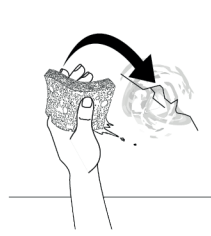

- 2 Cut the supplied adhesive strips round to the required size.

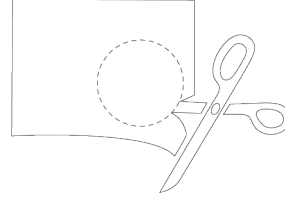

Note: The sticker should be at least 10mm larger on all sides than the damage.



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland

Teil.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99
E-Mail: info@pax-bags.de



www.pax-bags.com




X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
D-26203 Wardenburg
Germany



Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax-No: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99
Email: info@pax-bags.de




www.pax-bags.com

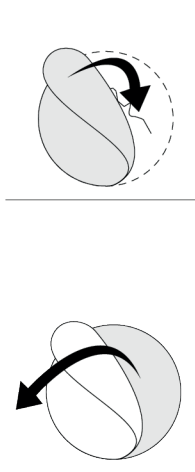

- 3 Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben den Klebepatch blasenfrei und mit festem Druck auf die defekte Stelle. Sobald der Klebepatch vollflächig verklebt ist, ist das Produkt wieder einsatzbereit.

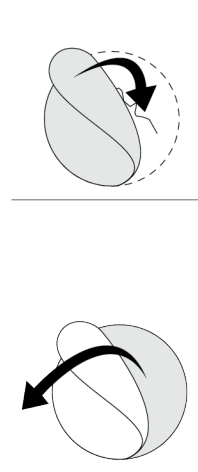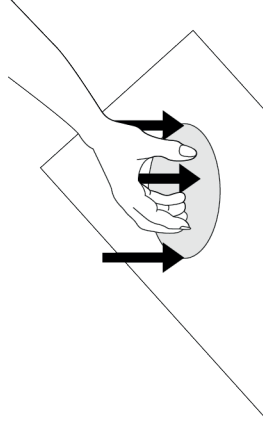

- 3 Remove the protective film and stick the adhesive patch onto the defective area without bubbles and with firm pressure. As soon as the adhesive patch is fully adhered, the product is ready for use again.

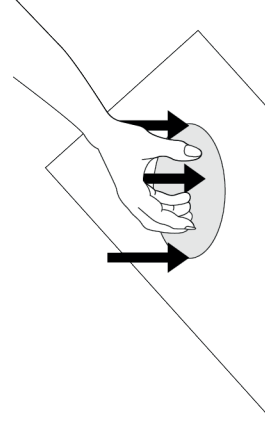

Anleitung PAX Reparaturaufkleber Vakuum

PAX



Instruction PAX Repair Patch Vacuum

PAX