



Montageanleitung
Assembly instruction

PAX-Clip In System (PCI) /
PAX-Clip In System (PCI)

Stand 2016




PAX-Clip-In System (PCI) / PAX-Clip-In system (PCI)

PAX-Ampullclip – Das kleine Klemmwunder!

Jeder Clip lässt sich einzeln auf der PAX-Clipschiene positionieren und auch einzeln wieder entfernen. Der Clip sitzt fest in seiner Position und ermöglicht ein einfaches, schnelles und sicheres Entnehmen der Ampulle.

Der PAX-Ampullclip ist ein kleines Klemmwunder. Mit nur einem Clip und diesem in doppelter Ausführung lassen sich Ampullen unterschiedlicher Größe problemlos auf der PAX-Clipschiene befestigen. Je nach Abstand der beiden Clips (eines Clippaares) können Brechampullen mit dem Inhalt 1-2 ml, 5 ml, 10 ml und 20 ml, sowie Stechapullen mit einem Durchmesser von bis zu 22 mm untergebracht werden. Bei größeren Durchmessern bis zu 30 mm wird ein zusätzliches Gummiband benötigt.


Bei geschickter Kombination können z. B. die Aqua dest. Plastikampullen direkt neben der Trockensubstanz gelagert werden. Die Clips können platzsparend direkt nebeneinander und völlig unabhängig von der Ampullenlänge angeordnet werden. Die PAX-Clipschiene wird dann jeweils nach Bedarf auf dem PAX-Clipschienenrahmen positioniert.

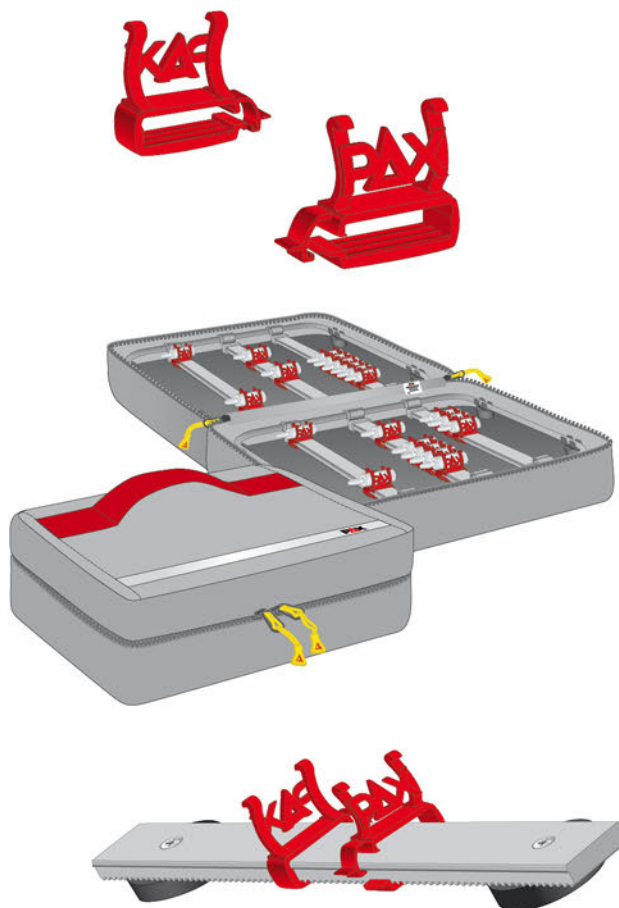


PAX-ampoule-clip – The little clip miracle!


Each clip can be individually positioned onto the PAX-clip-rail and can also be removed individually. The clip is tightly fixed into its position and thus removing an ampoule is simple, quick and safe.

The PAX-ampoule-clip is a little clip miracle. By only one double clip ampoules of different sizes can be fixed to the PAX-clip-rail without any problems. Depending on the distance between both clip-couples ampoules with a content of 1-2 ml, 5 ml, 10 ml and 20 ml as well as prick ampoules with a diameter of up to 22 mm can be stored. For diameters up to 30 mm a rubber band is required. By a clever combination e.g. the aqua dest. plastic ampoules can be stored directly next to the dry substances. The clips can be arranged directly next to each other in a space saving manner completely independent from the ampoule size. The PAX-clip-rail-frame is then positioned on the rail frame as requested.

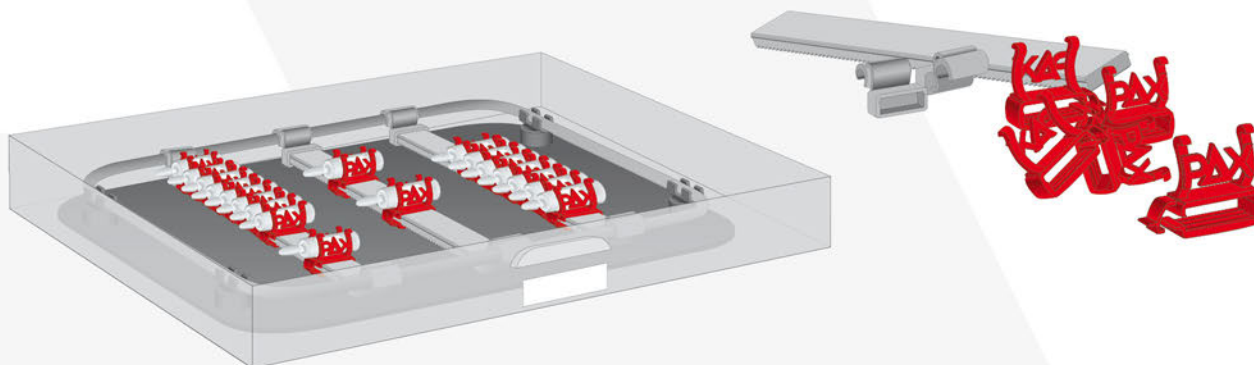

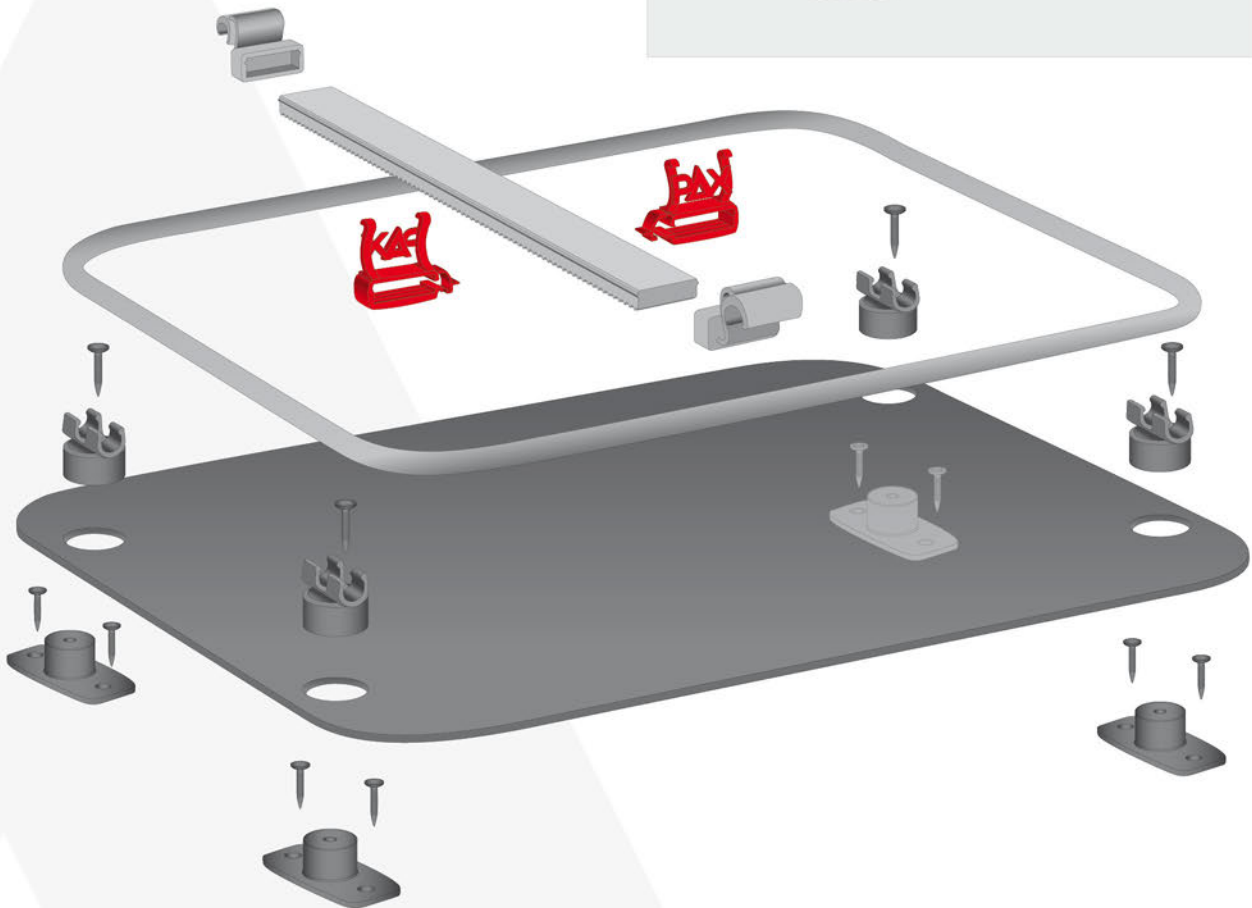


Einzelteile PCI System / Individual parts PCI system

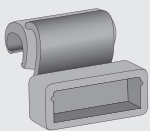

PAX-Rahmenclip /
PAX-rail-clip



PAX-Ampullendclip /
PAX-ampoule-clip

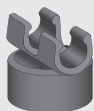

PAX-Clipfuß /
PAX-clip-base




PAX-Clipschiene /
PAX-clip-rail



PAX-Clipschienenrahmen /
PAX-clip-rail-frame




PCI-Beschriftungsplatte /
PCI-labelling plate

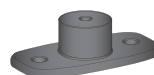


PAX-Einbaufuß /
PAX-mounting-base




Positionierung der PAX-Ampullenclips / Positioning of the PAX-ampoule-clip

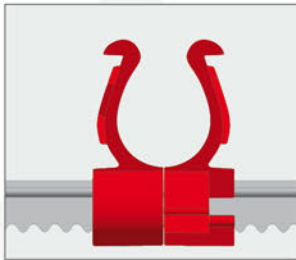


Durchmesser ca. 11 mm
z.B. 1 ml Ampulle
Approx. 11 mm in diameter
- e.g. 1 ml ampoule

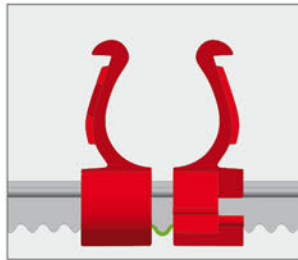

Durchmesser ca. 15 mm
z.B. 5 ml Ampulle
Approx. 15 mm in diameter
- e.g. 5 ml ampoule

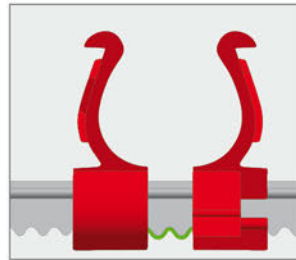


Durchmesser ca. 18 mm
z.B. 10 ml Ampulle
Approx. 18 mm in diameter
- e.g. 10 ml ampoule

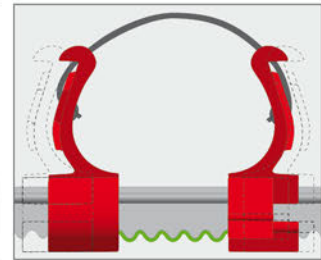


Durchmesser > 22 mm
Abstand > 5 Zähne
Diameter > 22 mm
Distance > 5 teeth

Befestigen der PAX-Rahmenclips an der PAX-Clipschiene / Attaching the PAX-rail-clip to the PAX-clip-rail

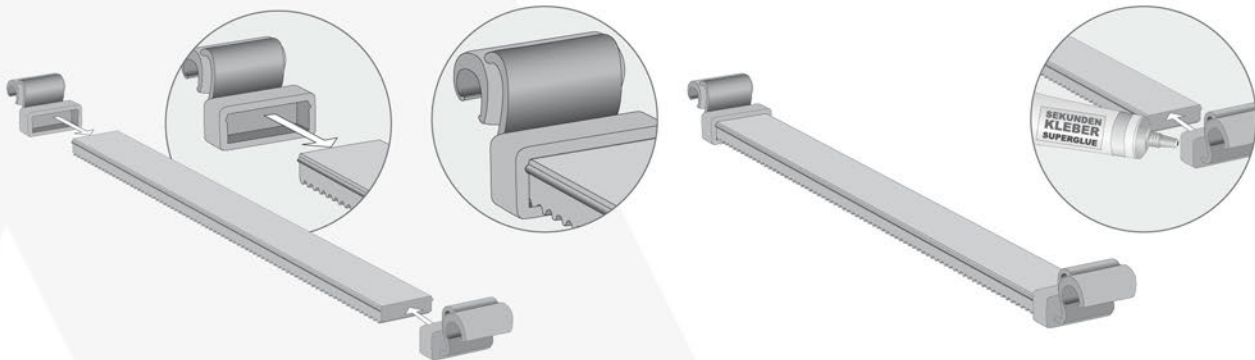

Befestigen der PAX-Ampullenclips auf der PAX-Clipschiene / Attach the PAX-ampoule-clip to the PAX-clip-rail

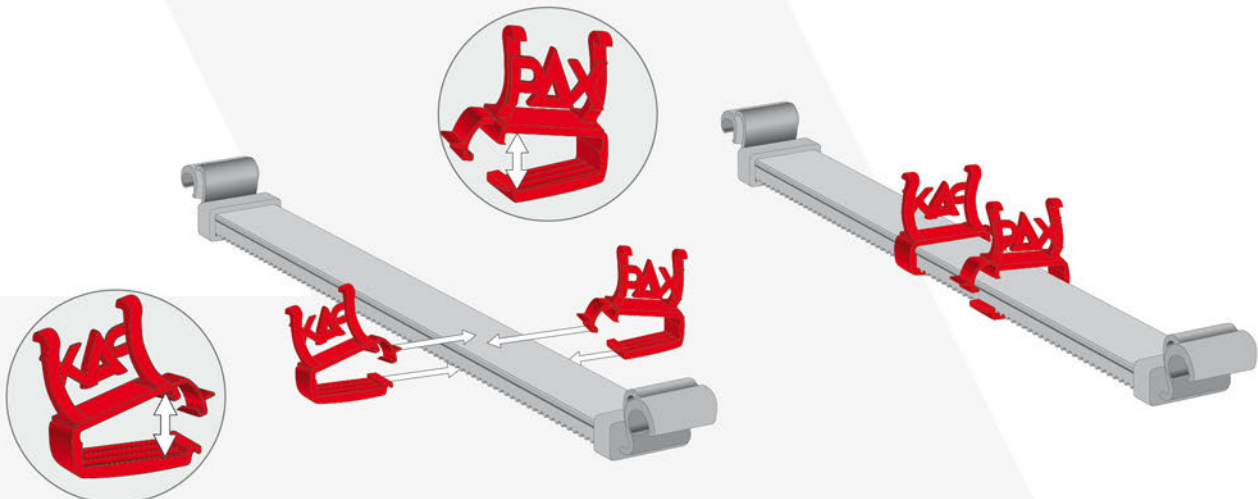




Verriegeln der PAX-Ampullenclips / Lock the PAX-ampoule-clips



Fest verriegelter
PAX-Ampullenclip
Locked
PAX-ampoule-clip




Entriegeln der PAX-Ampullenclips / Unlock the PAX-ampoule-clips

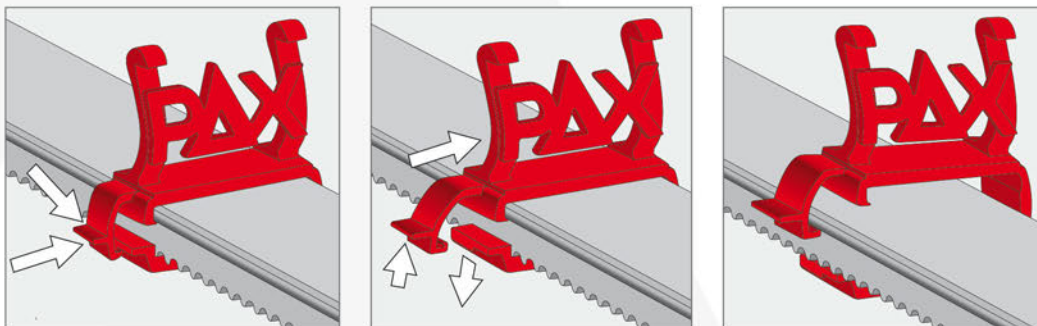


Positionieren der PAX-Ampullenclips / Positioning the PAX-ampoule-clips

Verschiebeposition
PAX-Ampullenclip
Position for sliding
the PAX-ampoule-clip

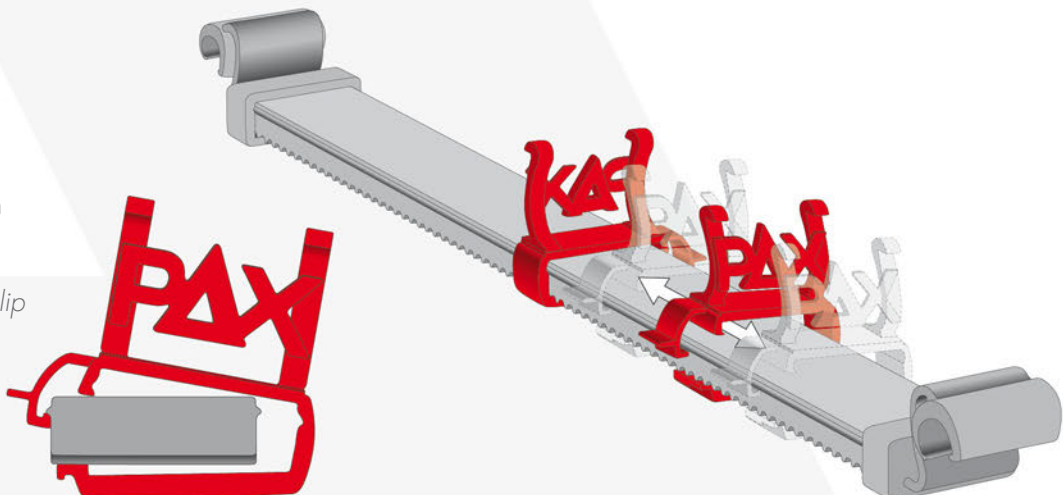





Befestigen der PAX-Clipschiene auf dem PAX-Clipschienenrahmen /
Attach the PAX-clip-rail to the PAX-clip-rail-frame

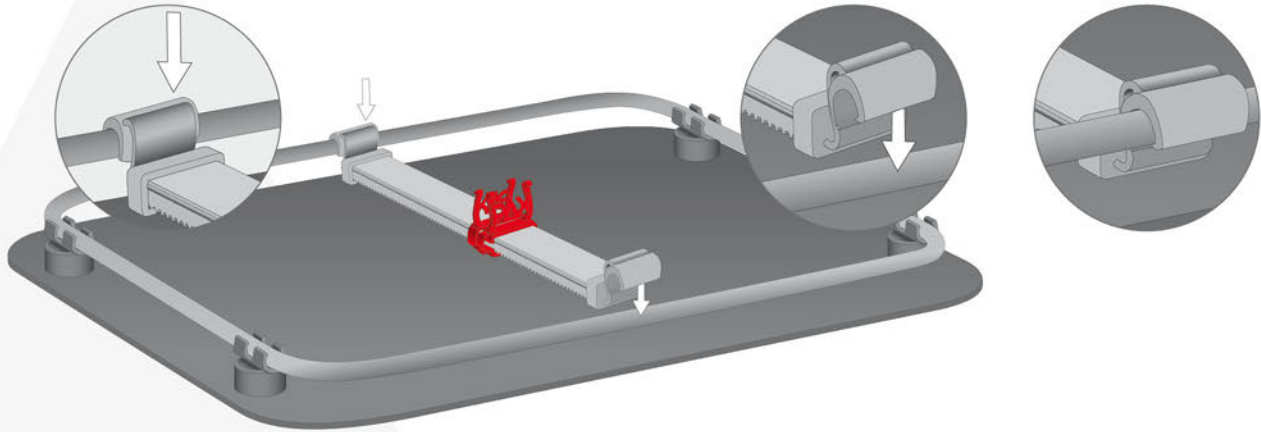

Herausnehmen der PAX-Clipschiene / Removal of the PAX-clip-rail

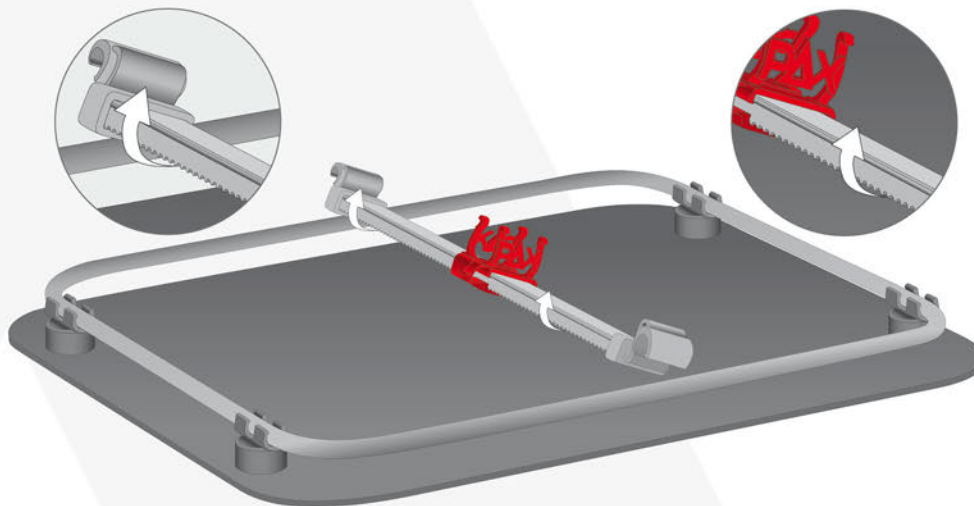


Befestigung von Ampullen / Medikamenten mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm
mit Hilfe des mitgelieferten Gummibandes /
Attachment of ampoules / medicamentes with a diameter up to 30 mm
using the supplied rubber band

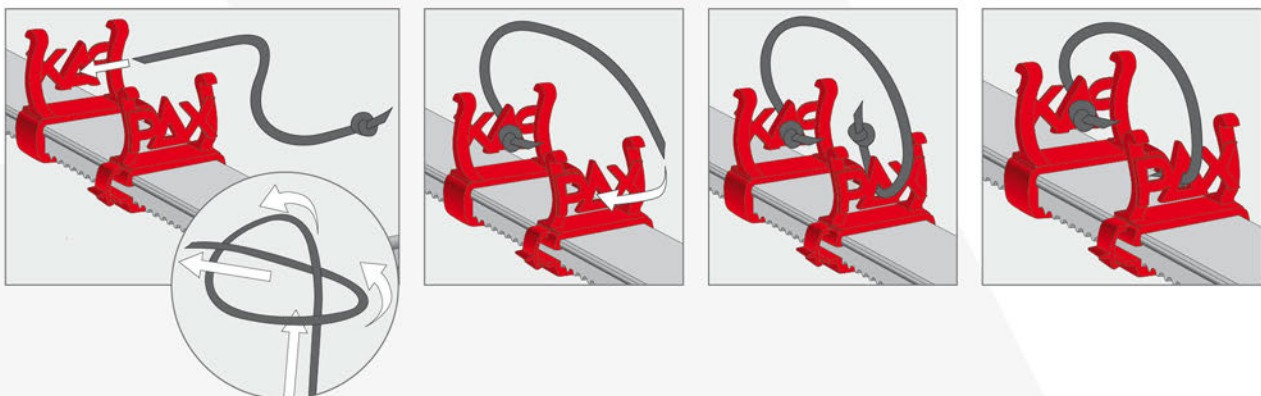




Montage des PCI Systems im Fahrzeug, Schrank oder Schublade / Assembly of the PCI system in a vehicle, cabinet or drawer

Position der PAX-Einbaufüsse markieren
Mark the position of the PAX-mounting-bases

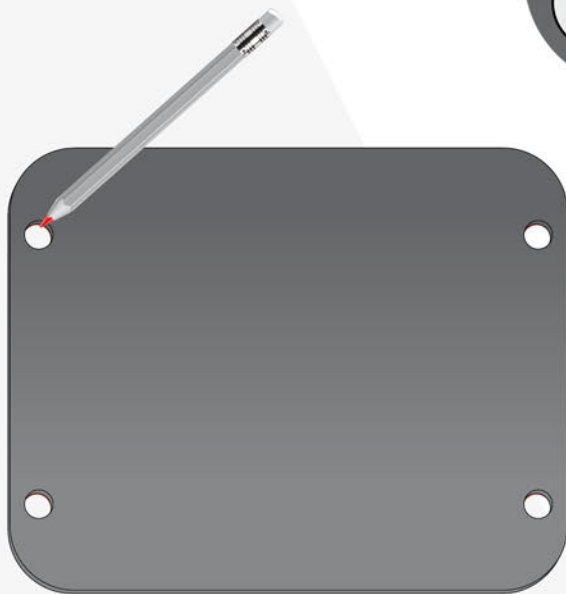


Befestigung der PAX-Einbaufüsse
an den markierten Stellen
Attachment of the PAX-mounting-bases
at the marked positions.

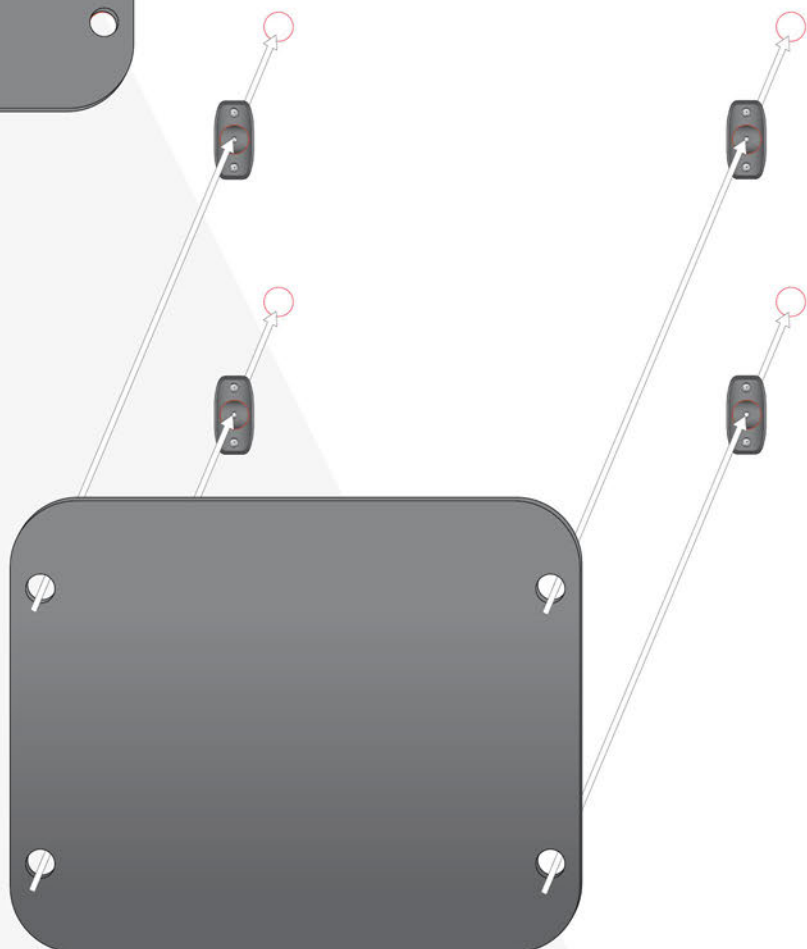




Montieren der PCI-Beschriftungsplatte / Assembly of the PCI-labelling plate

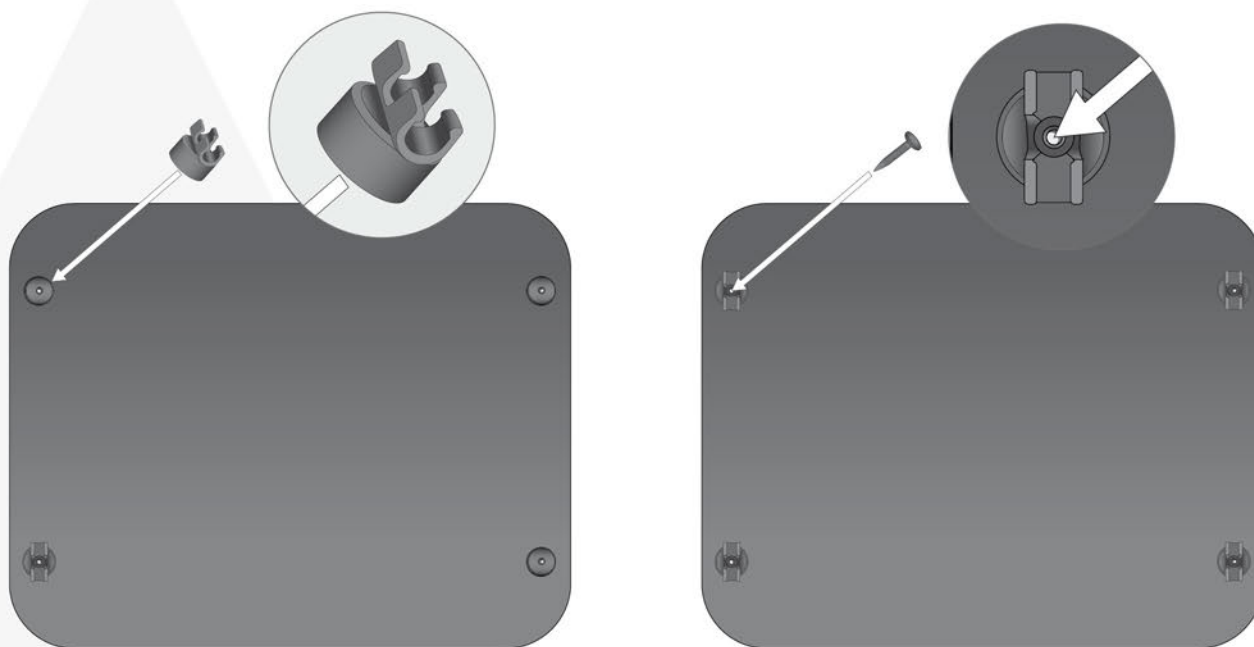

Montieren des PAX-Clipschienenrahmens / Assembly of the PAX-clip-rail-frame

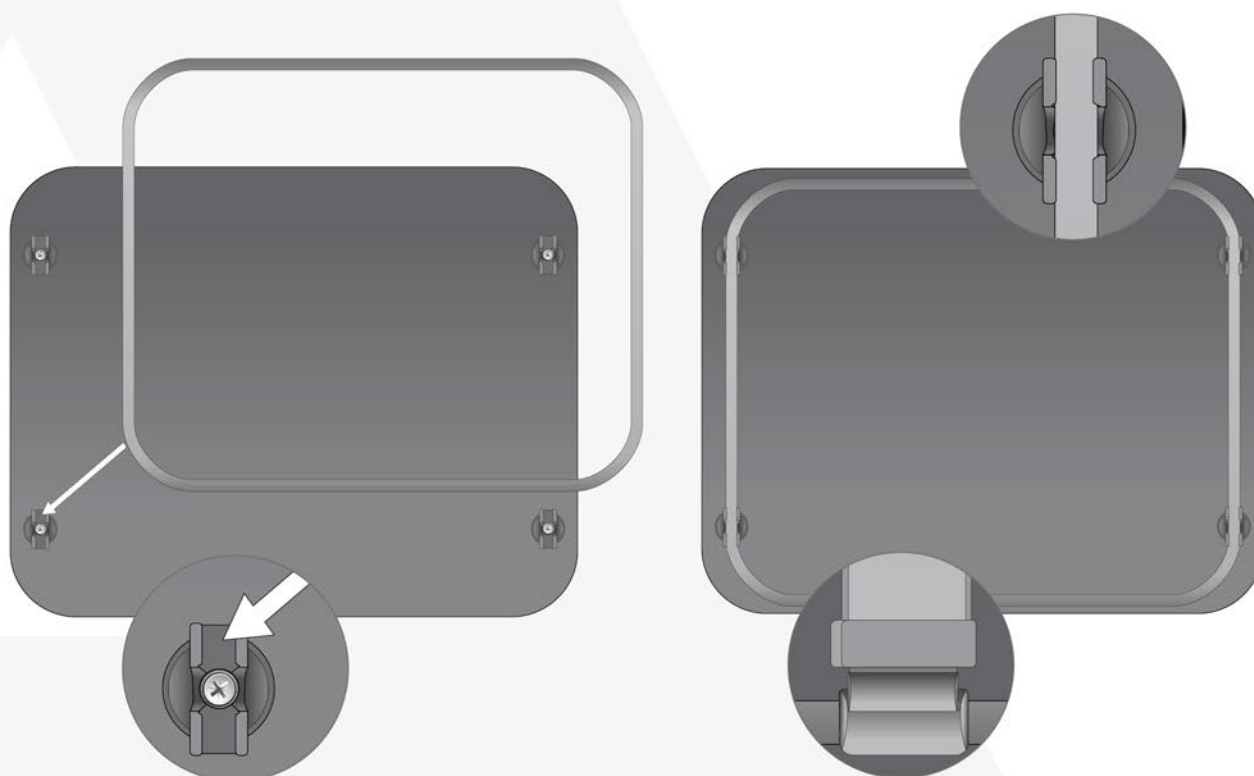



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30

26203 Wardenburg

Deutschland / Germany

Tel./Phone: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0

Fax/Fax-No: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99

E-Mail: info@pax-bags.de

www.pax-bags.de