

Kurzanleitung PAX Power Pack – 60/2

Gültig für die Anwendung mit PAX Wärmendecke – THX / THX 2.0



Bedienelemente

PAX Power Pack – 60/2

- ① Haupt- & Sicherheitsschalter
- ② PAX Funktionsschalter
- ③ Ladestand - Anzeige
- ④ Anschlussbuchse Stecker
PAX Wärmendecke – THX / THX 2.0
- ⑤ Ladebuchse für Ladegerät

1. Zweck

Das PAX Power Pack – 60/2 dient als mobile Stromversorgung für die PAX Wärmendecke – THX / THX 2.0 zur Wärmeerhaltung von Patientinnen und Patienten.

2. Vorbereitung

- Power Pack und Wärmendecke auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- Wärmendecke vor dem Einschalten immer am Power Pack anschließen.
- Power Pack ausschließlich mit dem originalen Ladegerät laden.



HINWEIS:

Ein gleichzeitiges Laden des Power Packs über das Steckernetzteil bei angesteckter Heizdecke ist nicht möglich und technisch bewusst so vorgesehen.

3. Einschalten und Bedienung

3.1 Haupt- & Sicherheitsschalter

- Der Haupt- & Sicherheitsschalter ist ausschließlich für die Hauptstromzufuhr zuständig.
- Die Status-LED (blau oder grün – je nach Ausführung) zeigt nur die generelle Betriebsbereitschaft des Power Packs an.
- In diesem Zustand findet noch keine Heizfunktion statt.

3.2 PAX Funktionsschalter

Der PAX Funktionsschalter hat mehrere Funktionen:

- Ist die Wärmendecke angeschlossen und der Funktionsschalter wird gedrückt, → startet die Heizfunktion der Wärmendecke.
- Gleichzeitig wird der Akkustand an der Front des Power Packs → über die vier weißen LEDs auf der Front angezeigt.



HINWEIS:






Wird der Funktionsschalter bei aktiviertem Haupt- & Sicherheitsschalter ohne angeschlossene Wärmendecke gedrückt, → wechselt das Power Pack in den Modus „Störung“ (rot blinkende LED mit Signalton).

Kurzanleitung PAX Power Pack – 60/2






Gültig für die Anwendung mit PAX Wärmedecke – THX / THX 2.0

4. Anzeigen und Bedeutungen

Funktionsschalter (optisch / akustisch):

-  Grün blinkend – Aufheizphase, Zieltemperatur noch nicht erreicht
-  Grün dauerhaft – Zieltemperatur erreicht, Betrieb OK
-  Gelb blinkend (+ kurzer Signalton) – 1 Heizkreis defekt, reduzierte Heizleistung
-  Gelb dauerhaft – 1 Heizkreis defekt, Zieltemperatur erreicht
-  Rot blinkend (+ Intervall Signalton) – Störung, Heizung abgeschaltet

Ladestandsanzeige:

-  4 LEDs = 100 %
-  3 LEDs = 75 %
-  2 LEDs = 50 %
-  1 LED = 25 %
-  Letzte LED blinkt
+ Piepton = < 10 %



HINWEIS:

Der Ladezustand des Power Packs kann nur mit angeschlossener Wärmedecke kontrolliert werden.


5. Betriebshinweise

- Patiententemperatur während der Anwendung regelmäßig überwachen.
- Wärmedecke nicht mit anderen Wärmequellen kombinieren.
- Keine Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.

6. Ausschalten

- Zum Beenden der Anwendung den Haupt- & Sicherheitsschalter drücken.
- Die Stromzufuhr wird vollständig unterbrochen.

7. Störung / Fehlbedienung

- Bei  roter Anzeige oder akustischem Alarm:
 - Anwendung sofort beenden.
 - Power Pack ausschalten.
 - Heizdecke korrekt anschließen und erneut einschalten.
 - Defekte Produkte einer technischen Prüfung zuführen.



HINWEIS:

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Gebrauchsanweisung des Herstellers.